

口腔マッサージ

アイス スティック

摂食嚥下障害の訓練、アイスマッサージに最適な
リハビリテーションのためのスティックです。

商品特長

使いやすい
角度設計

折れにくい

液だれしない

個包装で衛生的

しっかり握れる

使用方法

- ① 個包装袋に入った状態で、冷凍庫で凍らせます。 * 冷凍庫から出して持ち運ぶ際は、保冷剤を用いると便利です。
 - ② 個包装袋からスティックを取り出し、凍った先端部で口腔内を刺激することで、のどのアイスマッサージを行います。
- ⚠ 必ず医療従事者の指示に従って、ご使用ください。